




BUDOWA OPATRUNKU

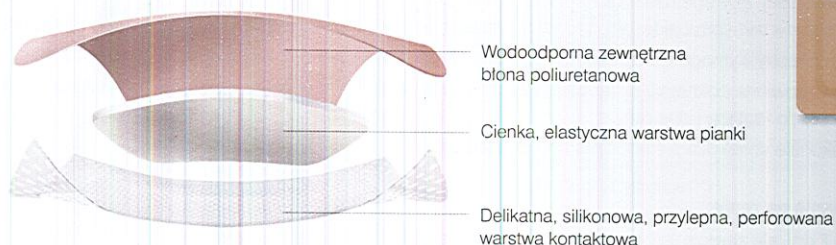

Postać produktu:

Sterylny opatrunek piankowy przylepny

DZIAŁANIE:

- Warstwa zewnętrzna stanowi wodoodporną barierę przeciw wirusom, bakteriom i innym drobnoustrojom minimalizując ryzyko infekcji, zapewnia również odpowiedni poziom paroprzepuszczalności.
- Utrzymuje wilgotne środowisko gojenia, wspomagające szybsze zamknięcie się rany.
- Powierzchnia stykająca się z raną pokryta perforowaną, delikatną **warstwą silikonową** pomaga zapewnić przyjazne i delikatne przyleganie do skóry.

WSKAZANIA DO ZASTOSOWANIA:

Rany z małym wysiękiem, takie jak np.:

- owrzodzenia w przebiegu zespołu stopy cukrzycowej, owrzodzenia goleni: żyłne, tętnicze i o mieszanej etiologii oraz odleżyny;
- rany chirurgiczne (np. rany pooperacyjne, także te, które pozostawiono do gojenia wtórnego przez ziarninowanie i miejsca pobrania skóry do przeszczepu);
- rany pourazowe (np. drobne otarcia, skaleczenia, pęcherze, rany szarpane);
- oparzenia pośredniej grubości (II stopnia).



Można przycinać



Nie przylepia się do rękawiczek, nie skleja się



Łatwy w aplikacji i usuwaniu



Wodoodporny



Stanowi ochronę przed bakteriami i wirusami z zewnątrz



Miękki, delikatny, elastyczny i komfortowy



Maksymalny rekomendowany czas pozostawiania na ranie - do 7 dni

WARTO WIEDZIEĆ:

- Położenie opatrunku można zmieniać w czasie aplikacji (można go odklejać i ponownie przyklejać w celu poprawy położenia, bez utraty jego właściwości przylepnych).
- Opatrunek może być przycinany w dowolnym kierunku, należy jednak zastosować dodatkowe umocowanie (bandaż lub przylepiec), aby opatrunek utrzymywał się na ranie. Trzeba pamiętać, że w przypadku docinania bariery ochronnej przeciw wirusom/bakteriom oraz wodoszczelność może zostać naruszona.
- Warstwa chłonna powinna pokrywać skórę na obszarze co najmniej 1-2 cm wokół rany.

Czas pozostawiania na ranie:

Maksymalnie do 7 dni, ale zawsze jest to uzależnione od obrazu klinicznego i ilości wysięku.

FoamLite™ ConvaTec			
Dostępne rozmiary	Rozmiar warstwy chłonnej	Nr katalogowy	Liczba sztuk w opak.
8x8 cm	5x5 cm	421557	10
10x10 cm	6,5x6,5 cm	421559	10
15x15 cm	11x11 cm	421561	10
5,5x12 cm	2,5x9,5 cm	421563	10
10x20 cm	6,5x14,5 cm	421928	10

chirurgia naczyniowa



chirurgia dermatologiczna



chirurgia plastyczna

