



Regionalna Anestezja

Espocan®

Właściwe rozwiązanie dla połączonego znieczulenia (CSE)

Połączone znieczulenie podpajęczynówkowe i zewnątrzoponowe



Perfekcyjny zestaw – Espocan®


Zestaw do połączonego znieczulenia podpajęczynówkowego i zewnątrzoponowego (CSE)

Metoda CSE łączy zalety dwóch głównych, dobrze znanych technik regionalnej anestezji: znieczulenia podpajęczynówkowego i zewnątrzoponowego, stosowanych na dużą skalę w zabiegach chirurgicznych i zwalczaniu bólu. B.Braun zmodyfikował typowe igły do znieczuleń zewnątrzoponowych i podpajęczynówkowych wykorzystywanych w metodzie „igła przez igłę”. W igle Tuohy modyfikacja polega na stworzeniu dodatkowego otworu na jej zagięciu. Igła podpajęczynówkowa natomiast została wyposażona w plastikowy kołnierz centrujący ją w igle Tuohy. Te modyfikacje powodują że wymienione igły są doskonale do siebie dopasowane i nadają się perfekcyjnie do techniki CSE. Dodatkowo zestaw wyposażony jest w strzykawkę Perifix LOR, cewnik zewnątrzoponowy, wygodny łącznik do cewnika oraz filtr zewnątrzoponowy wraz z elementem mocującym go do skóry. Wszystkie te elementy składają się na niezawodny zestaw, na którym można zawsze polegać.

Korzyści dla użytkownika

- Doskonale dobrane elementy zestawu dla przeprowadzenia bezpiecznej procedury
- Tylny otwór w igle Tuohy dla bezpiecznego wprowadzenia igły podpajęczynówkowej do przestrzeni podpajęczynówkowej
- Docking system – rozwiązanie pozwalające unieruchamiać igłę podpajęczynówkową w igle Tuohy
- Plastikowy kołnierz na igle podpajęczynówkowej celem gładkiego przejścia igły podpajęczynówkowej przez igłę Tuohy

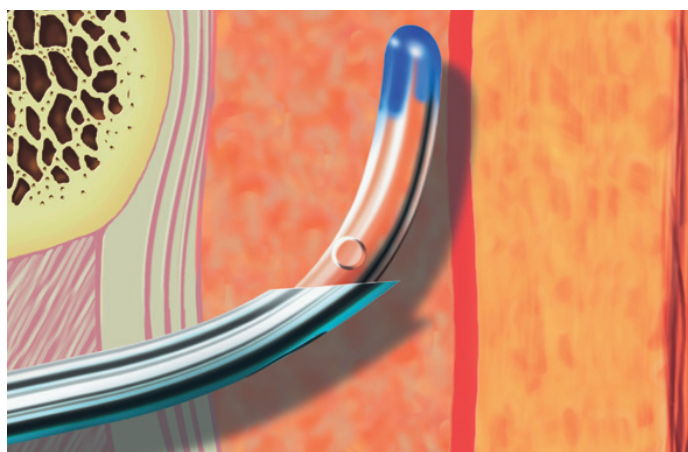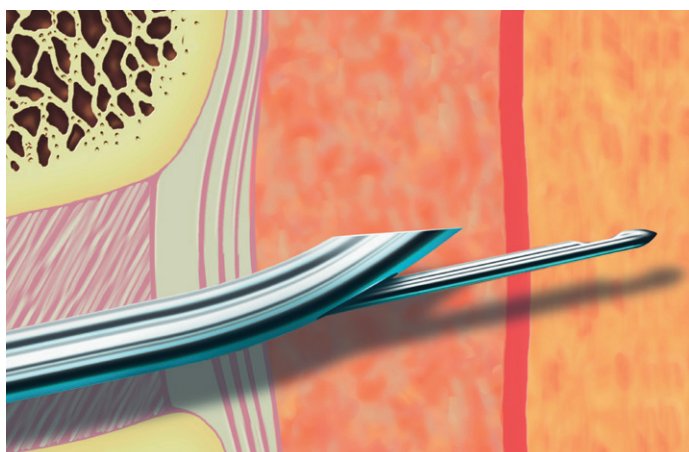

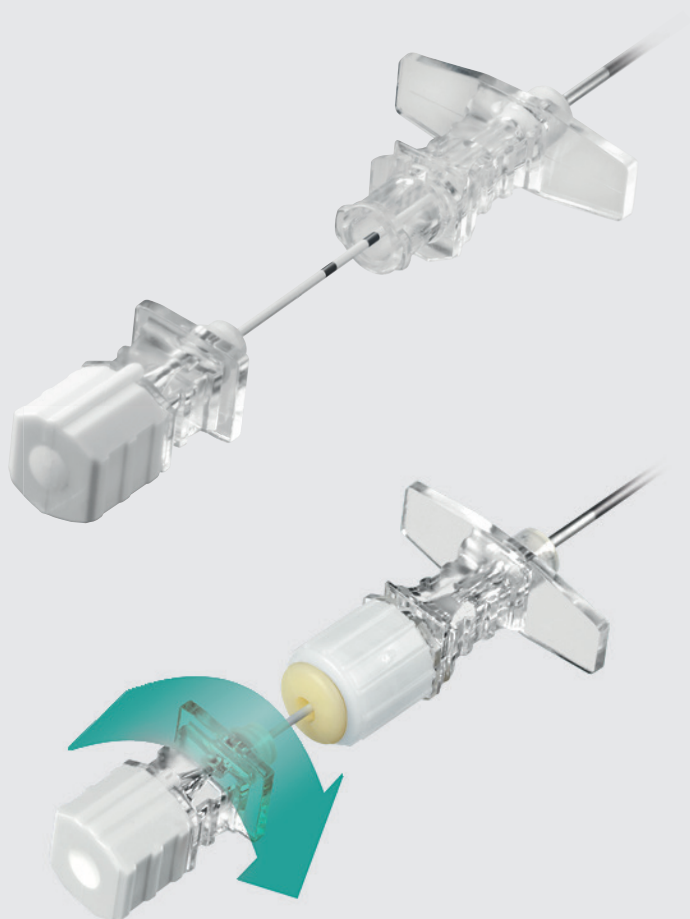


Znaczники na igle podpajęczynówkowej zestawu Espocan:


Dla większego bezpieczeństwa igły podpajęczynówkowe w każdym zestawie Espocan posiadają specjalne znaczniki dla określenia momentu kiedy końcówka igły podpajęczynówkowej wysuwa się przez tylny otwór igły Tuohy. Znaczniki znajdują się w różnych miejscach igły podpajęczynówkowej zależnie czy zestaw Espocan wyposażony jest w Docking system czy nie.

System unieruchamiania igły podpajęczynówkowej (Docking system)

- Zapewnia bezpieczne i łatwe mocowanie igły podpajęczynówkowej wewnątrz igły Tuohy po zakończonej sukcesem punkcji opony twardej
- Umożliwia obrót igły podpajęczynówkowej nawet gdy jest ona unieruchomiona
- Dzięki niewielkiej konstrukcji Docking system nie stwarza trudności związanych z manipulacją obiema igłami.

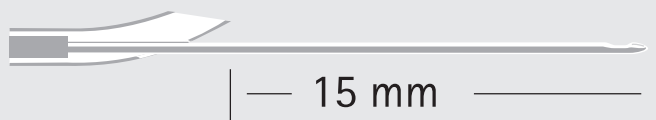

15 mm

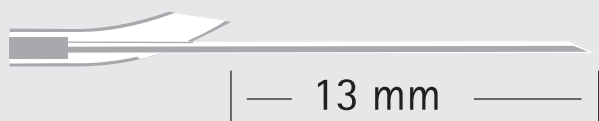


13 mm

Właściwe wysunięcie igły podpajęczynówkowej z igły Tuohy wynosi:

- 15 mm dla igły typu Pencil Point
- 13 mm dla igły ze szlifem Quincke

Specyfikacja produktu

Zestaw	Opis
	Zawartość zestawu:
	Perican® igła zewnątrzoponowa \varnothing 1.3 mm, 18G x 3 1/2"
	Strzykawka Perifix® (LOR) , Luer-Slip
	Filtr zewnątrzoponowy Perifix® 0,2 μ m
	Perifix® PinPad – mocowanie filtra do skóry
	Perifix® łącznik cewnika z filtrem

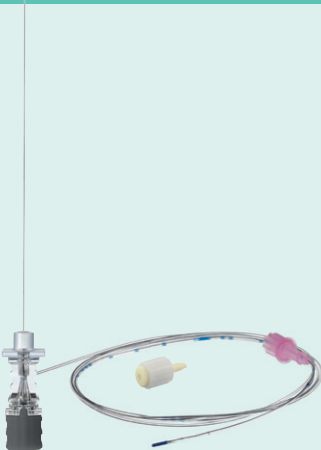Typy igieł podpajęczynówkowych i cewników w zestawach Espocan®	Opis	Igła \varnothing (G)	Długość (mm)	Igła \varnothing (mm)	Długość (cale)	Min. zamówienie	Numer katalogowy
	Ze standardowym cewnikiem Perifix®						
	Spinocan®	■ 27G	125,5	0,42	5"	10 szt.	4556674
	Pencan®	■ 27G	127,5	0,42	5"	10 szt.	4556666
	Z cewnikiem o miękkiej końcówce i Docking system						
	Spinocan®	■ 27G	136,5	0,42	5 3/8"	10 szt.	4556747
	Pencan®	■ 27G	138,5	0,42	5 3/8"	10 szt.	4556763

Zastosowanie wyrobu: Połączone znieczulenia podpajęczynówkowe i zewnątrzoponowe zapewniają szybkie i niezawodne znieczulenie podczas operacji. W razie konieczności znieczulenie można rozszerzyć lub wydłużyć w trakcie operacji. Zniesienie czucia bólu jest możliwe w dowolnym momencie po operacji (leczenie bólu).

AESULAP CHIFA sp. z o. o. | ul. Tysiąclecia 14 | 64-300 Nowy Tomyśl
tel. 61 44 20 100 | fax 61 44 23 936 | www.bbraun.pl

AESULAP CHIFA – firma grupy B. Braun