


# Instrukcja przygotowania i stosowania preparatu




## Enzymex L9

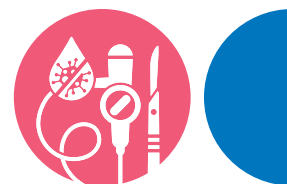

Trójenzymatyczny preparat  
do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi,  
endoskopów oraz innych wyrobów medycznych.

**Produkt do użytku profesjonalnego.**  
**Koncentrat – stosować w roztworach roboczych.**

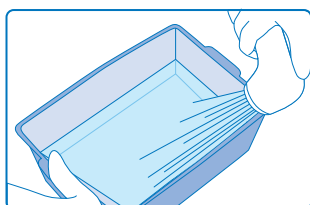


1

Napełnij wanienkę dezynfekcyjną lub myjkę ultradźwiękową wodą.




2

Na każdy litr wody wlej odpowiednią ilość koncentratu  
(5 ml koncentratu na litr wody). Zamieszaj roztwór.

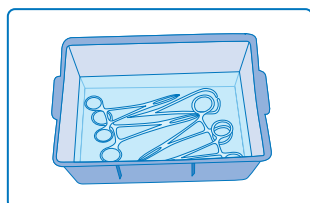


3

Dokładnie zanurz narzędzia.  
Wypełnij płynem wszystkie kanały endoskopu.

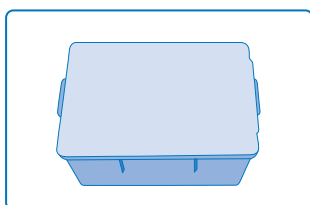


4

Wanienkę dezynfekcyjną przykryj. Odczekaj zalecany  
czas kontaktu: 10 minut. Doczyść, jeśli to konieczne.

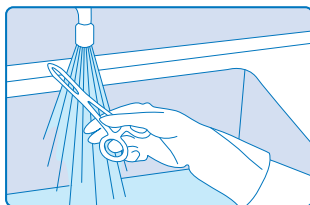

5

Wyjmij i wypłucz dokładnie wyroby medyczne pod bieżącą wodą.

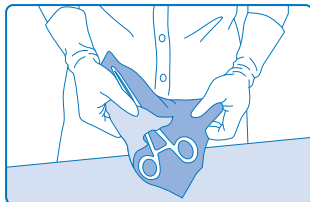

6

Osusz i poddaj dalszym odpowiednim procesom higienicznym  
zgodnym z przyjętą procedurą.